

Der richtige Umgang mit MUND-NASEN-SCHUTZ

OP-Masken:


1. **Reinigen Sie Ihre Hände** vor dem Aufsetzen der Maske mit einem alkoholischen Händedesinfektionsmittel oder mit Waschlotion und Wasser.




2. **Decken Sie Mund, Nase und Kinn mit der Maske ab** und stellen Sie sicher, dass keine Lücken zwischen Gesicht und Maske vorhanden sind.



3. **Vermeiden Sie es, die Maske während des Gebrauchs zu berühren;** wenn Sie die Maske berühren, reinigen Sie Ihre Hände mit alkoholischem Händedesinfektionsmittel oder mit Waschlotion und Wasser.

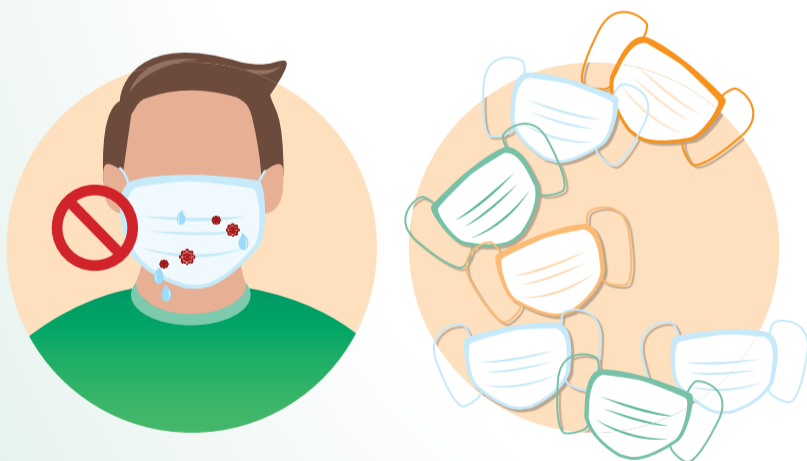

4. **Ersetzen Sie die Maske** durch eine neue, sobald sie feucht ist, und verwenden Sie Einwegmasken nicht erneut.

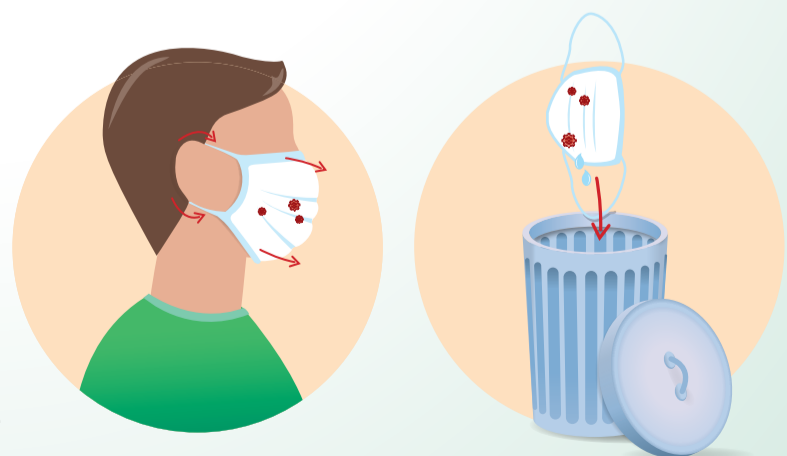

5. **Nehmen Sie die Maske von hinten** (an den Trägern) **ab** (berühren Sie nicht die Vorderseite der Maske); werfen Sie sie sofort in einen geschlossenen Behälter; reinigen Sie Ihre Hände mit alkoholischem Händedesinfektionsmittel oder mit Waschlotion und Wasser.